

指定医薬部外品

コンタクトレンズ装着薬



コンタクトの異物感・乾きに。
つけたてのうるうる感。

NEO
Fallin drop
フォーリンドロップ® ネオ

15mL

フォーリンドロップ ネオ 使用説明書

(販売名: CMフィットVI)

- 使用前には、必ずこの使用説明書をよく読み、表現や内容等でわからないことがあれば必ず眼科医に相談し、よく確認してからご使用ください。
- 使用説明書は大切に保管してください。
- この使用説明書に記載された事項は必ずお守りください。
- 本剤使用により少しでも異常を感じたら、直ちに眼科医に相談してください。
- コンタクトレンズの取扱いについてはレンズの添付文書をよく読み、その使用方法などを守ってください。

⚠ 使用方法の遵守に関する事項

使用方法及び使用上の注意等の内容を守り正しく使用しないと眼感染症等を生じ、重篤な場合には視力を失う可能性もあり得ますので、記載された事項は必ず守ってください。

フォーリンドロップ ネオの特徴

すべてのコンタクトレンズにお使いいただけます。

ソフト

ハード

O₂

使い捨て

コンタクトレンズの異物感・乾燥をおさえる

点眼薬にも配合されている「うるおい成分」が、レンズ装着時の異物感や刺激、乾燥を抑え、レンズ装用をサポート。快適なうるおいを与えます。

水分保持能力の高い水溶性高分子「ヒプロメロース」と「ポリビニルアルコール」が配合されています。

くもり・汚れを防止

涙に含まれているタンパク等の汚れはレンズのくもりや汚れの原因になります。フォーリンドロップ ネオは汚れがレンズに付着するのを抑える成分を配合しました。

健康な瞳をサポート

瞳に栄養を与える2種類のアミノ酸成分と、角膜保護剤としても使用されるコンドロイチン(粘稠化剤)を配合しています。

使用上の注意

- 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 本人または家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 目にはげしい痛みのある人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この使用説明書を持って医師または薬剤師に相談すること。
使用後、次の症状があらわれた場合

関連部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

効能効果

ハードコンタクトレンズ又はソフトコンタクトレンズの装着を容易にする。

用法用量

本剤の1～3滴で、コンタクトレンズの両面をぬらして装着すること。

用法・用量に関連する注意

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- 容器の先をコンタクトレンズ、指に触れさせないこと。また、混濁したものは使用しないこと。
- コンタクトレンズを装着したまま使用しないこと。
- 用法・用量を厳守すること。

成分 1mL中

有効成分:ポリビニルアルコール(部分けん化物)…10mg、ヒプロメロース…6mg、
塩化ナトリウム…2mg、タウリン…10mg、L-アスパラギン酸カリウム…1mg
添 加 物:ホウ酸、ホウ砂、エデト酸ナトリウム水和物、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム、
D-ソルビトール、塩酸ポリヘキサド

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 他の人と共用しないでください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後は速やかに使用してください。

※本剤の容器は、透明フィルムで密封包装されています。フィルム破れ等の不審な点が見られた場合は、下記の発売元へご連絡ください。

製造販売元
株式会社 エイコー

名古屋市中村区竹橋町10-17

発売元 **株式会社 アイセイ**

お客様窓口

☎ 0120-579-570

大阪市東淀川区東中島1丁目19番4号

© aisei.

23.02作成 42318-01